

CÓMO UTILIZAR UN TAPABOCAS



Un tapabocas solo es efectivo si se usa de la manera correcta.

En Packsys te enseñamos cómo utilizarlo:

1 Lava tus manos adecuadamente con agua y jabón por 20 segundos o más; o desinfectalas con gel antibacterial a base de 70% o más de alcohol.



2 Toma el tapabocas y asegúrate de identificar cuál es la parte interna y cuál la externa. Generalmente el lado azul va hacia afuera y el blanco, en contacto con nuestro rostro.

3 Despliega el tapabocas y ubica la barra de metal sobre la nariz.



4 Coloca las bandas elásticas por detrás de las orejas.

5 Oprime suavemente la barra metálica para que se ajuste al contorno de la nariz.



6 Asegúrate de tener bien cubiertas nariz, boca y barbilla.



Recuerda no tocar el cubrebocas con las manos; a la hora de retirarlo, hazlo desde las bandas elásticas y deséchalo.

